


Lubristil[®] INTENSE

HIALURONATO SÓDICO
RETICULADO 0,4%

30 ENVASES
UNIDOSIS
de 0,5ml
CON CIERRE

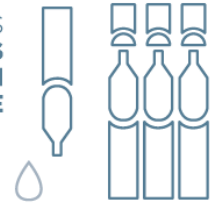

Lubristil INTENSE es una solución oftálmica estéril con pH fisiológico, basada en una tecnología patentada de reticulación del ácido hialurónico con urea (de manera que se forma una malla entre el ácido hialurónico y la urea). Esta reticulación hace que aumenten y mejoren las propiedades mecánicas específicas del ácido hialurónico, resistiendo a la degradación de las hialuronidasas mucho más tiempo que el ácido hialurónico natural, obteniendo así una acción lubricante e hidratante mayor y más prolongada.

La estructura hidratante en forma de malla del ácido hialurónico reticulado es capaz de suministrar agua durante un período prolongado al mismo tiempo que mejora las propiedades lubricantes del ácido hialurónico natural aumentando sus efectos humectantes, por ello está indicado como un adyuvante en el síndrome del ojo seco.

El ácido hialurónico reticulado es eficaz eliminando radicales libres, confiriéndole una acción re-epitelizante para mayor protección de la superficie corneal.

El ácido hialurónico reticulado proporciona al producto propiedades lubricantes, humectantes y reparadoras, capaces de aliviar la sequedad ocular debida al síndrome del ojo seco, irritación o fatiga ocular en caso de afecciones inflamatorias o factores ambientales, cirugía ocular o cirugía estética de párpados y blefaritis crónica.

Lubristil INTENSE alivia el enrojecimiento, la sequedad, la fatiga y las molestias de los ojos y la mucosa ocular causadas por el síndrome del ojo seco, factores ambientales como el viento, el humo, la contaminación, la exposición prolongada a la luz solar, la salinidad, el agua del mar o la piscina, el estudio intensivo, el trabajo, el uso prolongado del ordenador o pantallas de visualización, un largo período de conducción, las anomalías lagrimales debidas a inflamación, la cirugía ocular o la cirugía estética de los párpados y la blefaritis crónica.

Hidrata y lubrica la córnea y la conjuntiva en caso de ojo seco debido al uso de lentes de contacto.

La fórmula ha sido desarrollada para asegurar el máximo confort rápidamente tras su aplicación. Es adecuada para el uso diario, de día y de noche.

No contiene conservantes y / o moléculas con acciones antiinflamatorias y vasoconstrictoras.

Indicaciones: **Lubristil INTENSE** está indicado

- en el restablecimiento y la mejora de la estabilidad de la película lagrimal en el síndrome del ojo seco;
- después de cirugía refractiva;
- para el alivio de los ojos en casos de enrojecimiento, fatiga y malestar del ojo o de la mucosa ocular debido a:
 - factores ambientales (aire acondicionado, exposición excesiva a la radiación solar, viento, humo, contaminación, agua de mar o agua de la piscina y la salinidad);
 - sequedad de los ojos debido a la fatiga excesiva causada por el trabajo con ordenadores durante largos períodos, el estudio;
 - anomalías lagrimales debidas a inflamación, blefaritis crónica;
 - anomalías lagrimales debidas a cirugía ocular de naturaleza diversa o cirugía estética del párpado;
 - el uso de lentes de contacto blandas o semirígidas.

Composición:

Solución acuosa de polímero reticulado de hialuronato sódico (de la cual el polímero reticulado de hialuronato sódico es el 0,4%), trometamol, ácido hidrociorhídrico 2N, cloruro de sodio, agua para inyectables.

Sin conservantes.

Instrucciones de uso:

- separe un envase unidosis de la tira y ábralo girando y luego levantando el tapón de cierre.
- instilar 2 gotas en cada ojo presionando ligeramente el envase
- después del uso cierre inmediatamente el envase unidosis. La solución debe utilizarse en las siguientes 12 horas tras la primera apertura.

Advertencias y precauciones:

- el producto es para uso individual.
- el producto está destinado únicamente al uso oftálmico.
- no utilizar el producto si el envase está deteriorado en el momento de la primera apertura o no está perfectamente cerrado.
- durante la aplicación, evitar tocar el ojo y cualquier otra superficie con la punta del dispensador del envase.
- debido a su viscosidad característica, justo después de la instilación puede provocar visión borrosa que desaparece rápidamente.
- no utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes de la fórmula.
- en caso de problemas durante el tratamiento, interrumpir el uso y consultar a un médico.
- no utilizar después de la fecha de caducidad indicada en la caja y en el envase unidosis.
- deseche el envase correctamente después de usarlo.
- mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación:

30 unidosis de 0,5 ml con cierre.

Condiciones de conservación:

Conservar entre 2°C y 30°C en lugar seco, lejos del calor y de la exposición directa a la luz solar

La solución debe utilizarse dentro de las 12 horas después de la apertura del envase.

Caducidad:

Sin abrir: no exceder la fecha de caducidad indicada en la caja y en el envase unidosis.

Fecha de la última revisión del texto: 03.03 02/2020

 **C.O.C. Farmaceutici S.r.l.**
Via Modena, 15
40019 Sant'Agata Bolognese (Bo) Italia

Comercializado por:
ANGELINI PHARMA ESPAÑA, S.L.
C. Osi, 7, 08034 Barcelona - España
www.lubristil.es

AF-P/01



Desechar de forma adecuada después de su uso.

 **1936**

STERILE A


ANGELINI

